

# SOUNDGATE

SoundGate für den TV-Empfang  
KURZANLEITUNG

## Einführung

Diese Kurzanleitung beschreibt die Benutzung des SoundGates für den Empfang des TV-Tons.


Der TV-Ton wird über den TV Adapter via Bluetooth® an das SoundGate übertragen.

Stellen Sie zunächst sicher, dass der TV Adapter gemäss Bedienungsanleitung korrekt mit dem Fernseher verbunden ist.

Sobald der TV Adapter eingeschaltet ist, werden alle Operationen für den Empfang des TV-Tons über das SoundGate gesteuert.

Die Reichweite des TV Adapters beträgt ca. 10 m.

## SoundGate Übersicht

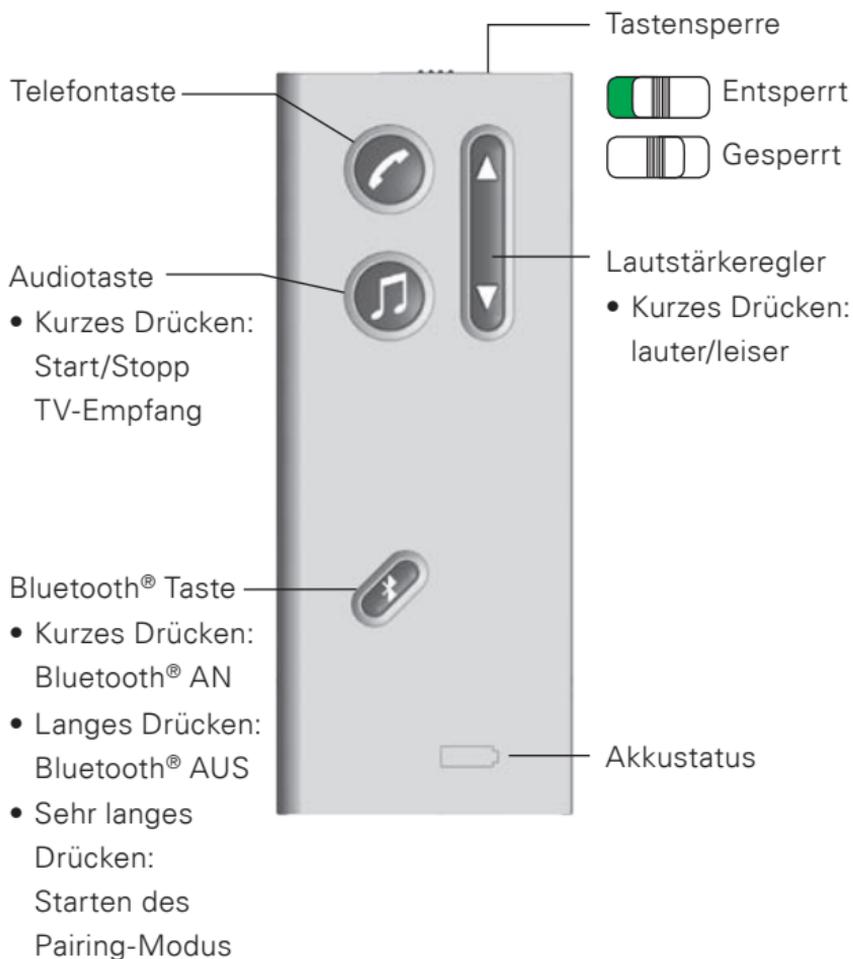

## Vorbereiten des SoundGate für den TV-Empfang

Vor der erstmaligen Verwendung des SoundGate mit dem TV Adapter müssen die beiden Geräte miteinander gepairt werden (Pairing = Paaren/Verbinden).

### Pairing

1. Um den TV Adapter und SoundGate zu pairen, legen Sie die beiden Geräte in einem geringen Abstand (< 30 cm) nebeneinander.
2. Halten Sie die SoundGate Bluetooth®-Taste für 5 Sekunden gedrückt, bis die blaue Leuchte schnell zu blinken beginnt. 
3. Die beiden Geräte bauen nun eine Verbindung auf. Bitte warten Sie ca. 1 Minute.
4. Nach einer Minute ist der TV Adapter mit dem SoundGate verbunden und das Pairing abgeschlossen. Die orange Statusleuchte des TV Adapters leuchtet dauerhaft. 

Status

Sobald das Pairing einmal erfolgreich abgeschlossen wurde, sollte ein erneutes Pairing nicht mehr notwendig sein.

# TV Empfang Start/Stopp

## Vor dem TV-Empfang

Tragen Sie das SoundGate mit der Umhängekordel um Ihren Hals. Sie müssen sich innerhalb der Reichweite des TV Adapters (max. 10 m) befinden.

Drücken Sie die Audiotaste für den TV-Empfang.



## Ton AN

Drücken Sie die Audiotaste.

Das SoundGate verbindet sich mit dem TV Adapter. Nach wenigen Sekunden wird die orange Leuchte am SoundGate und am TV Adapter dauerhaft leuchten. Die Hörsysteme empfangen nun den TV-Ton.



  
Status

## Ton AUS

Drücken Sie die Audiotaste.

SoundGate wird die Verbindung zum TV Adapter unterbrechen. Beide orangen Leuchten erlöschen. Die Hörsysteme kehren in das vorherige Hörprogramm zurück.

## Hinweis

Die Bluetooth®-Funktion des SoundGate muss zum Empfang des TV-Tons aktiviert sein. Ist Bluetooth® einmal nicht aktiv, wird sich der Bluetooth®-Empfang automatisch aktivieren, sobald der TV-Ton vom TV Adapter übertragen wird. Das Deaktivieren der Bluetooth®-Funktion muss manuell über die Bluetooth®-Taste erfolgen.

