

WIDEX TV PLAY

WICHTIGE HINWEISE

Mit dem neuesten Firmware-Update für alle Evoke FUSION 2-Hörsysteme (Version 7.0.9) ist Widex TV PLAY ab sofort auch ohne Smartphone steuerbar.



1. Firmware-Update Evoke FUSION 2

- a) Alle ab dem 1. Juli 2019 ausgelieferten Widex Evoke FUSION 2-Hörsysteme beinhalten automatisch die erforderliche Firmware 7.0.9.
- b) Bei bereits verkauften/vorhandenen Evoke FUSION 2 haben Sie die Möglichkeit, **das Firmware-Update über die Anpass-Software** (Compass GPS 3.3 SP1, erhältlich ab Juli 2019) durchzuführen: **SITZUNGSBEGINN > FIRMWARE-UPDATE**. Alternativ lässt sich die Hörsystem-Firmware auch über ein kompatibles Smartphone mit Evoke-App V.1.3 aufspielen.

2. Einmalige Paarung der Hörsysteme mit TV PLAY

- a) TV PLAY wird per Audio- und Stromkabel angeschlossen.
- b) Die Hörsysteme werden in einem Abstand von max. 1 m zu TV PLAY platziert und durch Öffnen und Schließen der Batterieklappe neu gestartet.
- c) Bei erfolgreicher Paarung ertönen ein Signalton und die Programm-Ansage „Fernsehen“ in beiden Hörsystemen. Kurz darauf beginnt die Übertragung des TV-Signals.

3. Möglichkeiten zur Steuerung von TV PLAY



Via Hörsysteme¹

- Start/Stopp TV PLAY
- Lautstärkeregelung



Via RC-Dex²

- Start/Stopp TV PLAY
- Lautstärkeregelung



Via Evoke-App³

- Start/Stopp TV PLAY
- Lautstärkeregelung (Gesamtlautstärke, Lautstärke TV, Lautstärke links/rechts)
- Stummschaltung (Mikrofone, TV-Signal)
- Equalizer (Bass, Mitten, Höhen)
- Soundmischer

¹ Benötigte HG-Tastenbelegung: Präferenz- und Programmwechsel (kurzer Tastendruck: rechts lauter/ links leiser, langer Tastendruck: Programmwechsel ins TV PLAY-Programm „Fernsehen“).

² Programmwechsel ins TV PLAY-Programm „Fernsehen“, Lautstärkeregelung über Plus-/Minus-Tasten.

³ Einstellung über die Evoke-App im TV PLAY-Programm. Siehe Kompatibilitätsliste der Evoke-App unter <https://global.widex.com/en/support/evoke-hearing-aid-app/compatibility>.